

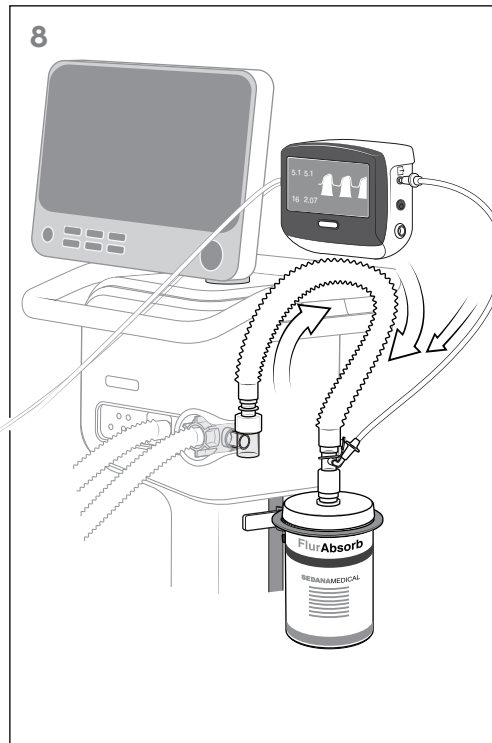
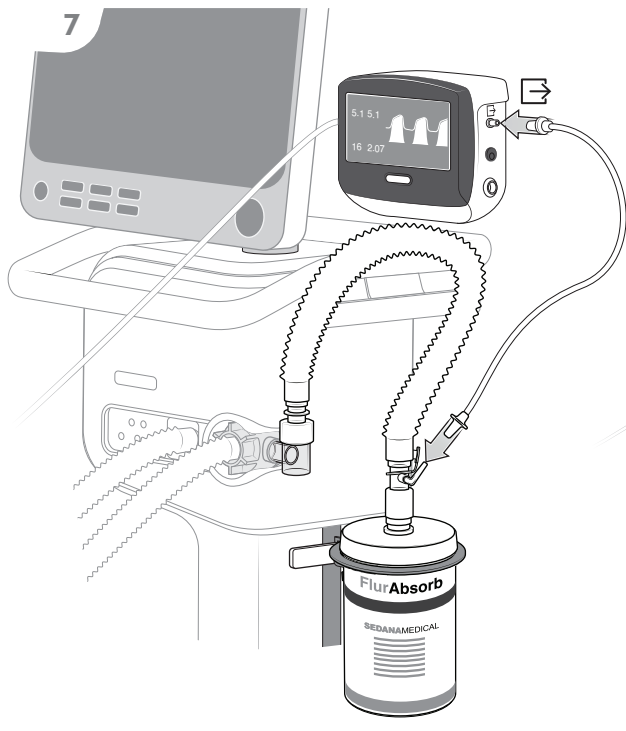


FlurAbsorb Accessory Kit Hamilton T1/C-Series

REF 2026076

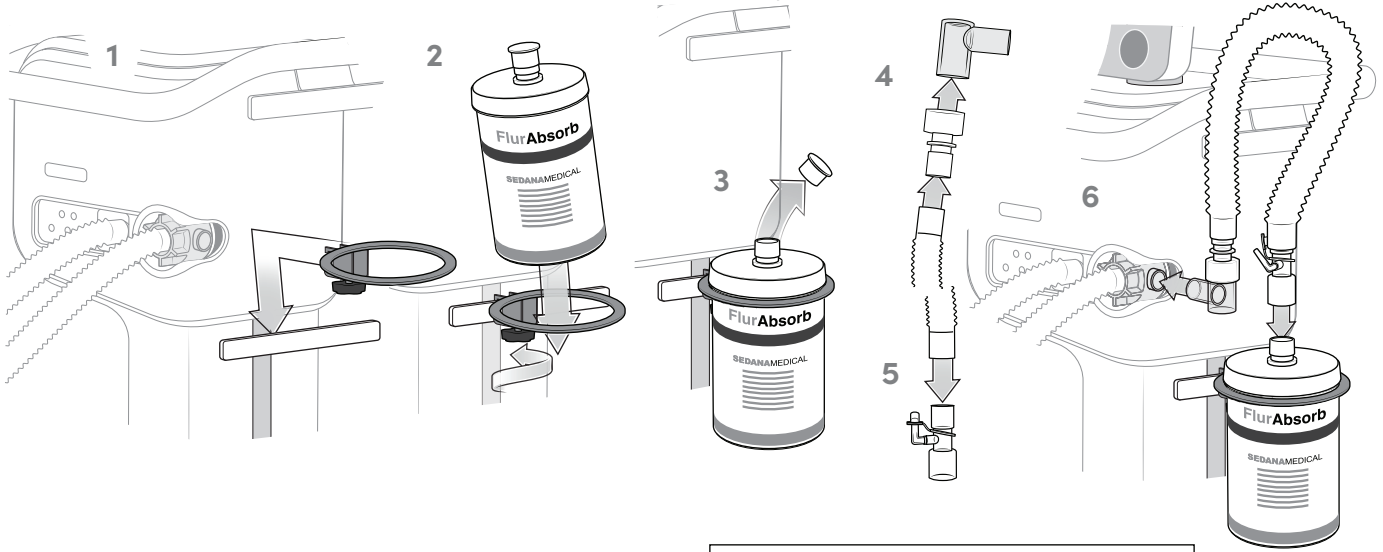

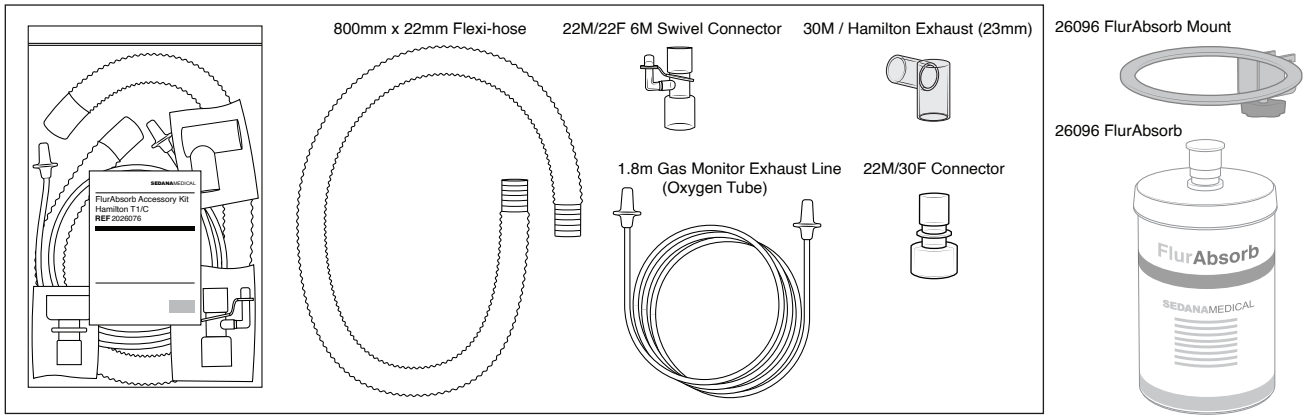

EN	In case of a serious incident please contact the competent authority and the legal manufacturer Sedana Medical Ltd.
DE	Im Falle eines schwerwiegenden Ereignisses wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde und den rechtmäßigen Hersteller Sedana Medical Ltd.
FR	En cas d'incident grave, veuillez contacter l'autorité compétente et le fabricant légal Sedana Medical Ltd.
ES	En caso de incidente grave, póngase en contacto con la autoridad competente y el fabricante legal Sedana Medical Ltd.
IT	In caso di incidente grave contattare l'autorità competente e il produttore legale Sedana Medical Ltd.
SV	Vid en allvarlig incident ska du kontakta behörig myndighet och den juridiska tillverkaren Sedana Medical Ltd.
NO	Hvis det oppstår en alvorlig hendelse, må du kontakte kompetent myndighet og den juridiske produsenten Sedana Medical Ltd.
DA	I tilfælde af en alvorlig hændelse bedes du kontakte den kompetente myndighed og den juridiske producent, Sedana Medical Ltd.
FI	Vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja lailliselle valmistajalle, joka on Sedana Medical Ltd.
EL	Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή και τον νόμιμο κατασκευαστή Sedana Medical Ltd.
NL	Neem bij een ernstig incident contact op met de bevoegde autoriteit en de wettelijke fabrikant Sedana Medical Ltd.
PL	O każdym poważnym wypadku należy poinformować właściwy organ i producenta — firmę Sedana Medical Ltd.
PT	Em caso de incidente grave, entre em contato com a autoridade competente e com o fabricante legal Sedana Medical Ltd.
RU	В случае серьезного инцидента обратитесь в компетентный орган и к официальному производителю Sedana Medical Ltd.
EE	Tõsise intsidendi korral võtke ühendust pädeva asutuse või seadusliku tootjaga Sedana Medical Ltd.
SL	V primeru resnega incidenta se obrnite na pristojni organ in zakonitega proizvajalca Sedana Medical Ltd.
CZ	V případě vážného incidentu kontaktujte příslušný úřad a legálního výrobce, společnost Sedana Medical Ltd.
SK	V prípade závažného incidentu kontaktujte príslušný orgán a zákonného výrobcu Sedana Medical Ltd.
TR	Ciddi bir olay durumunda lütfen yetkili makam ve yasal üretici olan Sedana Medical Ltd. ile iletişime geçin.
HR	U slučaju ozbiljnog incidenta obratite se nadležnom tijelu i odgovornom proizvođaču u Sedana Medical Ltd.
HU	Súlyos esemény esetén forduljon az illetékes hatósághoz és a Sedana Medical Ltd. törvényes gyártóhoz.
SR	U slučaju ozbiljnog incidenta, obratite se nadležnom telu i odgovornom proizvođaču Sedana Medical Ltd.
RO	În cazul apariiei unui incident grav, vă rugăm să contactai autoritatea competentă i producătorul legal Sedana Medical Ltd.
AR	في حالة وقوع حادث خطير، يرجى الاتصال بالسلطة المختصة و المصنع القانوني Sedana Medical Ltd.
KO	심각한 사고가 발생한 경우에는 관할 당국 및 법적 제조사인 Sedana Medical Ltd.에 문의하십시오.
JP	重大なインシデントが発生した場合は、所轄官庁および法的製造業者の Sedana Medical Ltd. までお知らせください。
ZH	如果发生严重事故，请联系主管部门和合法制造商 Sedana Medical Ltd.
BG	В случай на сериозна злополука се свържете с компетентния орган и с официалния производител Sedana Medical Ltd.

